

# Smart Nursing Con Claria & Sharesource



**Team Dialysis Specialist Baxter**  
EDTNA Riccione 8 maggio 2018

ALESSANDRO- ANNA- BARBARA- BIANCA- CLAUDIA- GIANNI- MARIAGRAZIA- MARINELLA- SIMONA- STEFANO-



Svolge attività di formazione/consulenza/collaborazione con i Centri Dialisi al fine di conseguire pratiche cliniche efficaci ed efficienti riferite alla cura dei pazienti con malattia renale avanzata e/o in trattamento sostitutivo. Pianifica, organizza ed attiva iniziative educazionali rivolte ai team degli Health Care Professional - HCP (medici, infermieri) e altre figure che operano nell'area della patologia renale, al fine di promuovere la quality della cura fornita alla persona assistita e alla sua famiglia.

**S** haresource

**M** odel

**A** dvanced

**R** emote

**T** herapy

**NURSING**



# L'EVOLUZIONE DEL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI IN DIALISI AUTOMATIZZATA

**Baxter**


Anni 1980-1990



# L'EVOLUZIONE DEL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI IN DIALISI AUTOMATIZZATA


**Baxter**

Anni 1990-2000

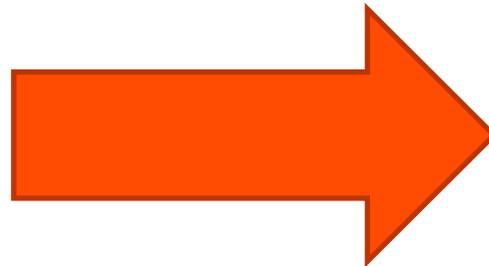


# L'EVOLUZIONE DEL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI IN DIALISI AUTOMATIZZATA

2016

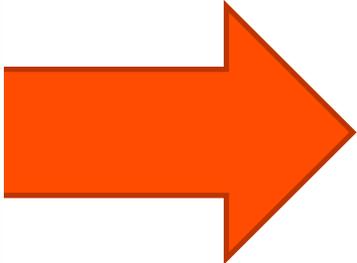


La piattaforma di connettività Sharesource fornisce una connessione diretta tra i clinici e i loro pazienti.

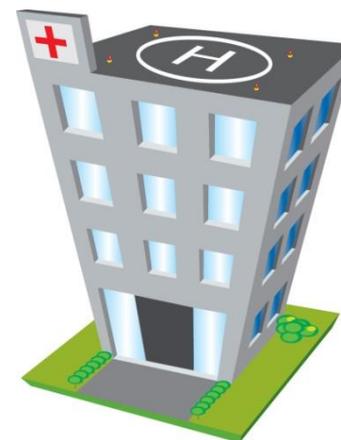

Comprende un portale web per accedere alle informazioni di trattamento che:

- Consente agli utenti di visualizzare e gestire le informazioni del trattamento
- Comunica da remoto con HC Claria
- Trasferisce i dati ad un server centrale
- Aiuta nella revisione, analisi e valutazione dei risultati dei trattamenti del paziente

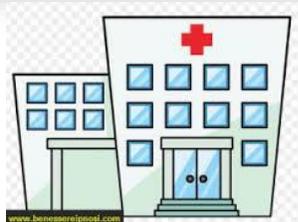

www.baxteresipool.com



## PIATTAFORMA SHARESOURCE:

- Accessibilità da qualsiasi dispositivo
- Esclusiva comunicazione a due vie
- Accesso alle informazioni del paziente a distanza
- Gestione proattiva del programma del cycler

ShareSource Non per uso umano. ATTENZIONE! Dispositivo a scopo di ricerca. Limitato allo scopo di ricerca dalla legge federale (o degli Stati Uniti).

Baxter

Informazioni ShareSource

Indirizzo e-mail Password

Entra

Password dimenticata





## Homechoice PRO

Schermo a fluorescenza con visualizzazione dei messaggi su una sola riga

Dimensioni: 49,5 x 17,8 x 39,9 cm

Peso: 12,3 kg

Oltre 30 lingue disponibili

Può funzionare con un unico livello di tensione 220 V

Memoria sufficiente per una settimana di trattamento

Grado di protezione elettrica Classe 1

Renalsoft installato sul pc del centro dialisi / PRO Card e lettore PRO Card



## Homechoice Claria

Display OLED con caratteri più grandi e luminosi e visualizzazione dei messaggi su due righe

Dimensioni: 46,7 x 19,4 x 38,7 cm

Peso: 13,5 kg (+1,2 kg)

41 lingue disponibili (+8 vs Homechoice PRO)

Tensione universale: 115 e 230 V

Memoria più capiente: può memorizzare fino a circa 90 giorni di terapia

Grado di protezione elettrica Classe 2

**La piattaforma di connettività web Sharesource consente il monitoraggio del paziente da remoto**

**Casa paziente:  
cyclers e modem cellulare**



**Centro dialisi:  
Accesso al Portale  
Clinico di Sharesource**

Not for human use CAUTION Investigational device. Limited by Federal (or United States) law to investigational use.

Sharesource

Dr. Eva Mulowski (Logout)  
Northwest Dialysis Centers United  
11 Main Street

Clinical | Reports | Clinic Settings | Patient Administration | Users | Help

Clinical  
Treatment Dashboard  
Patient Search

Attending Physician: All  
Treatment Progress: All  
Devices: All  
Modality: All

Legend 24 July 2014 - 30 July 2014

Patient	Thursday 24	Friday 25	Saturday 26	Sunday 27	Monday 28	Tuesday 29	Wednesday 30
<a href="#">Anderson, Benny</a> 09 May 1963 Current Device: Homechoice Claria	✓	!	✓	✓	✓	--	!
<a href="#">Carmichael, William</a> 20 January 1909 Current Device: Homechoice Claria	✓	!	✓	✓	✓	!	--
<a href="#">Lynne, Eric</a> 12 June 1954 Current Device: Homechoice Claria	✓	✓	--	!	!	✓	✓
<a href="#">Tavira, Cláudia</a> 28 February 1901 Current Device: Homechoice Claria	✓	✓	!	!	--	✓	✓

Records 1-4 of 4

# LE TESTIMONIANZE DEI COLLEGHI DAL CAMPO

Frosinone



Acireale



Catania




Lecco





## VANTAGGI PER IL CENTRO

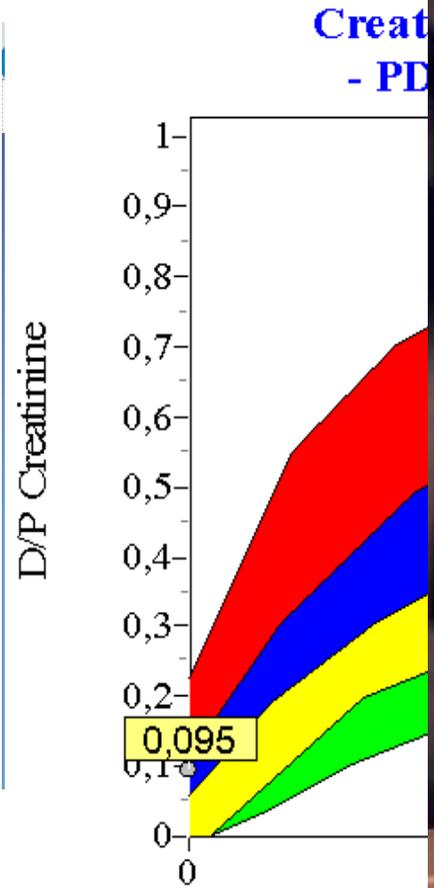

**Baxter**

CLINICI PIU' RILEVANTI

! !!

minuti 45 minuti

TICI DEL PAZIENTE



2

## VANTAGGI PER IL PAZIENTE



to investigational use.

Dr. Eva Mulewski (Logout)  
Northwest Dialysis Centers United  
11 Main Street

Uber? Help

Modality  
All Filter

	Monday 28	Tuesday 29	Wednesday 30
	✓	---	!
	✓	!	---
	!	✓	✓
	---	✓	✓

# LA STORIA DI DAVIDE

---


"Non invidio a Dio il Paradiso  
perché io sono felice nel vivere in Sicilia"

Federico II, *Stupor Mundi*



Davide è un giovane uomo ed ha la fortuna di vivere in un angolo di questo paradiso...

...dove ogni giorno gode di viste meravigliose e ogni sera vede il sole tuffarsi nel mare.

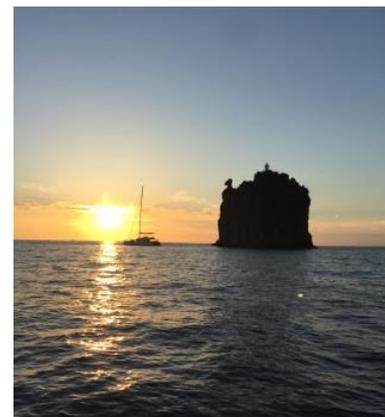

Questo angolo di paradiso è Vulcano, una delle isole Eolie.

Dove Davide ha il suo lavoro, la sua casa, sua moglie e splendidi figli... tutti lo conoscono sull'isola!

Si dedica passeggiate e a varie attività sportive, non ultima la subacquea, che gli permette di mantenersi in perfetta forma fisica.



La malattia renale però non guarda in faccia a nessuno!


Ti cerca e ti scova anche se ti sei rintanato sull'isola della felicità.



Davide da qualche anno è in cura con il centro dialisi di riferimento per le Eolie: Milazzo.

Dove ogni tanto si reca per la visita di controllo.

A Lipari invece può eseguire esami ematochimici perché c'è il centro emodialisi per gli isolani .... ed i turisti!

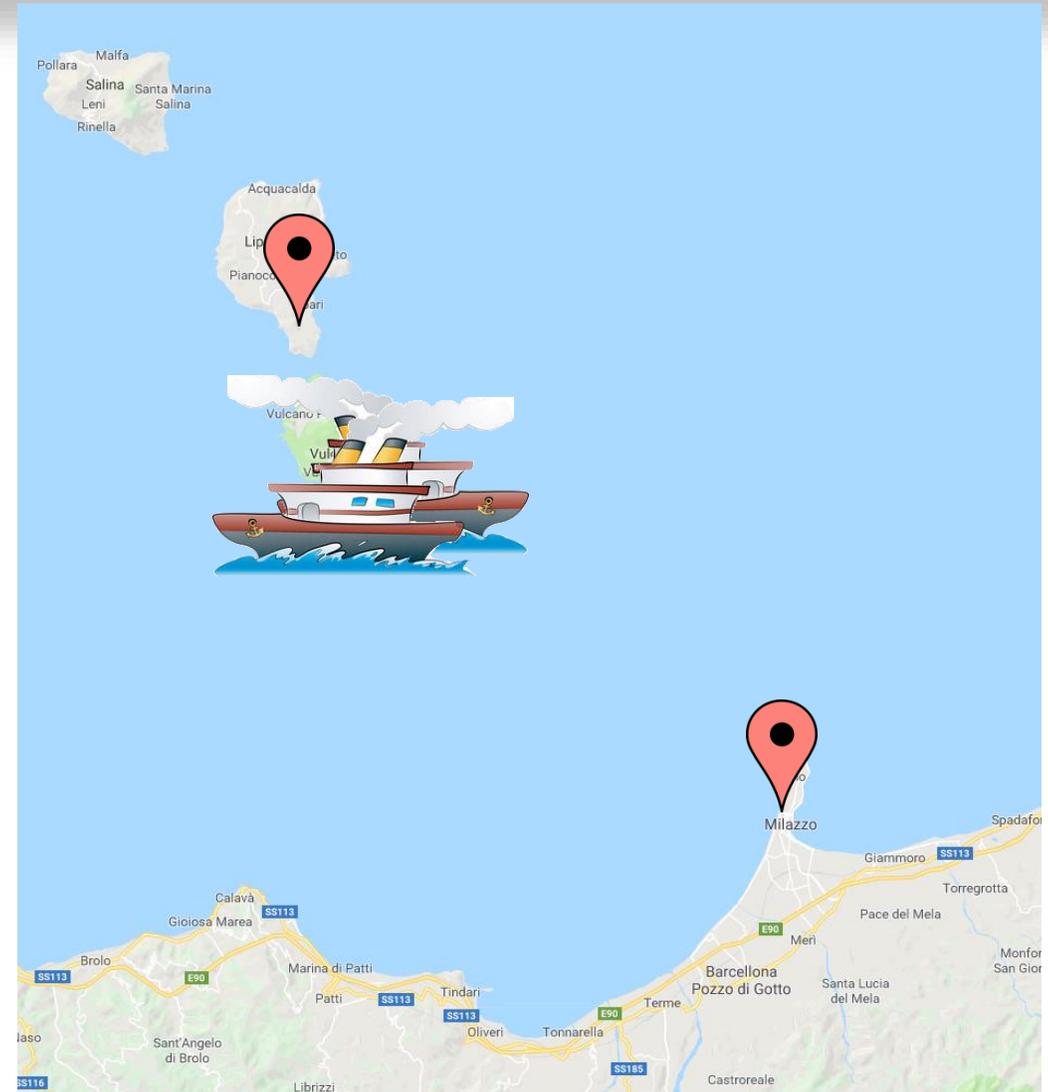

Il 2017 non inizia bene!

Il medico comunica a Davide che è arrivato il momento tanto temuto.... e si sceglie il trattamento domiciliare peritoneale.

Quindi si programma l'intervento chirurgico per l'impianto del catetere.



Inizia il training per la metodica manuale: qualche giorno presso il centro dialisi a Milazzo e qualche giorno di training anche al domicilio.

E con l'aria di primavera arriva a Vulcano anche la fornitura domiciliare per la metodica manuale.



Davide è fiducioso.

In famiglia tutti lo sostengono.

E' abbastanza autonomo nelle manovre.

Comunque anche la moglie ha imparato la gestione della dialisi domiciliare: dalla medicazione, allo scambio.



...non si sa mai,  
dopotutto siamo su un'isola!!!



Infatti il primo periodo è un po' difficile.

E' necessario qualche controllo clinico più ravvicinato per:

- Monitorare i parametri
- Affinare la terapia
- Controllare l'emergenza cutanea

...e non sempre le condizioni del mare sono favorevoli!




Fortunatamente in casa di Davide sono tecnologici.

Lo smartphone e internet danno una mano per scambiare foto e messaggi con il centro, e contribuiscono a tranquillizzare le normali «preoccupazioni».



Come pattuito con il medico, poco dopo Davide inizia il training per la metodica automatizzata.

E con le ondate turistiche, l'aria estiva porta sull'isola anche *Home Choice PRO* con la relativa fornitura di sacche.

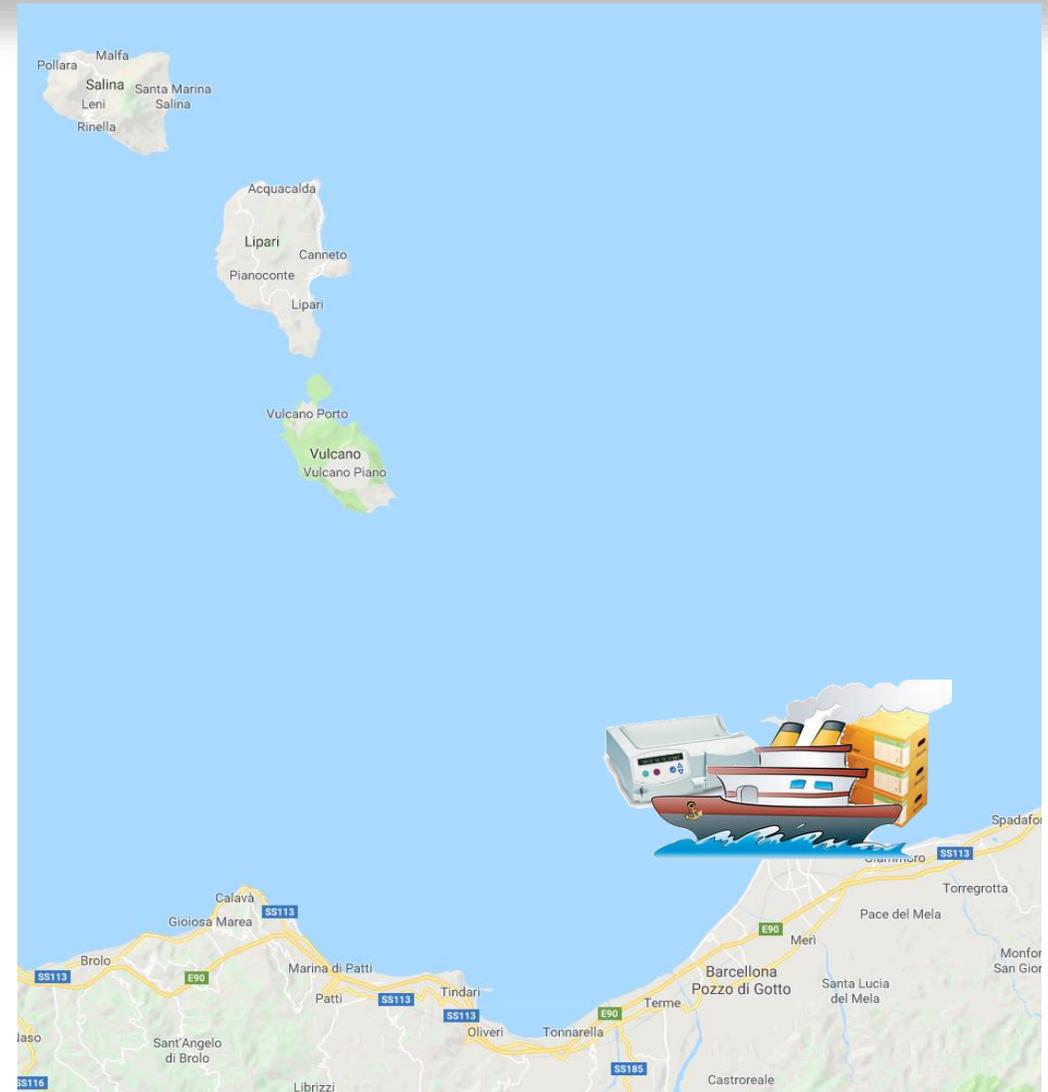

La metodica automatizzata notturna permette a Davide di riprendere a dedicarsi a piccole attività lavorative.

Infatti, da quando ha iniziato la dialisi, si sente meglio ed ora è libero tutta la giornata ed è il momento di darsi da fare.



Il programma di terapia dialitica sulla CARD non è bloccato.

Davide ha ricevuto dal medico del centro tutte le rassicurazioni per farsi guidare telefonicamente in caso di modifica della terapia... Infatti si è verificato qualche allarme durante il training e a Davide è difficile recarsi frequentemente al centro per modificare la terapia!



VULCANO



MILAZZO




Davide è contento.

La dialisi automatizzata va bene.

Riesce a gestire in autonomia i rari allarmi del cyclor.

Ha sempre la fornitura manuale di sicurezza.

Presso il centro di Lipari può eseguire i controlli ematochimici che invia tramite fax o mail al suo medico di Milazzo.

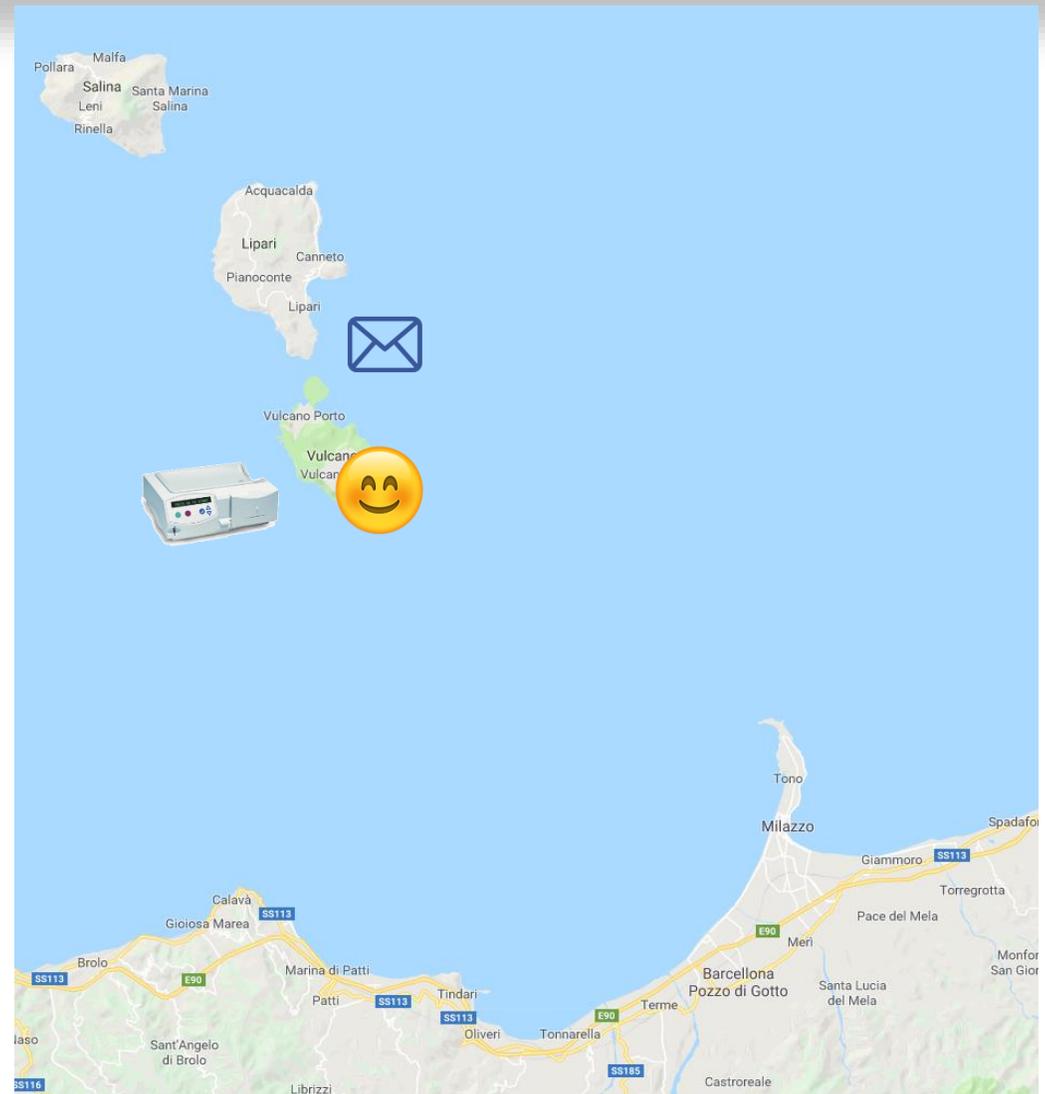


...ma a Milazzo una volta al mese bisogna andare!

E ovviamente anche Davide (come tanti pazienti) si presenta regolarmente ben dopo la scadenza:

- La visita gli comporta l'impiego di un'intera giornata!
- Un certo impegno economico
- Traghetto di andata...(se il mare lo permette)
- Trasferimento in ospedale
- Visita (scaricare tutta la CARD, valutare i trattamenti e le problematiche emerse, eventuale nuova prescrizione)
- E poi tutto il ritorno, traghetto compreso...  
...(se il mare lo permette)




A fine 2017 anche a Milazzo viene introdotta *Home Choice CLARIA* con la piattaforma SHARESOURCE e Davide è il primo paziente del centro ad usufruire di CLARIA.

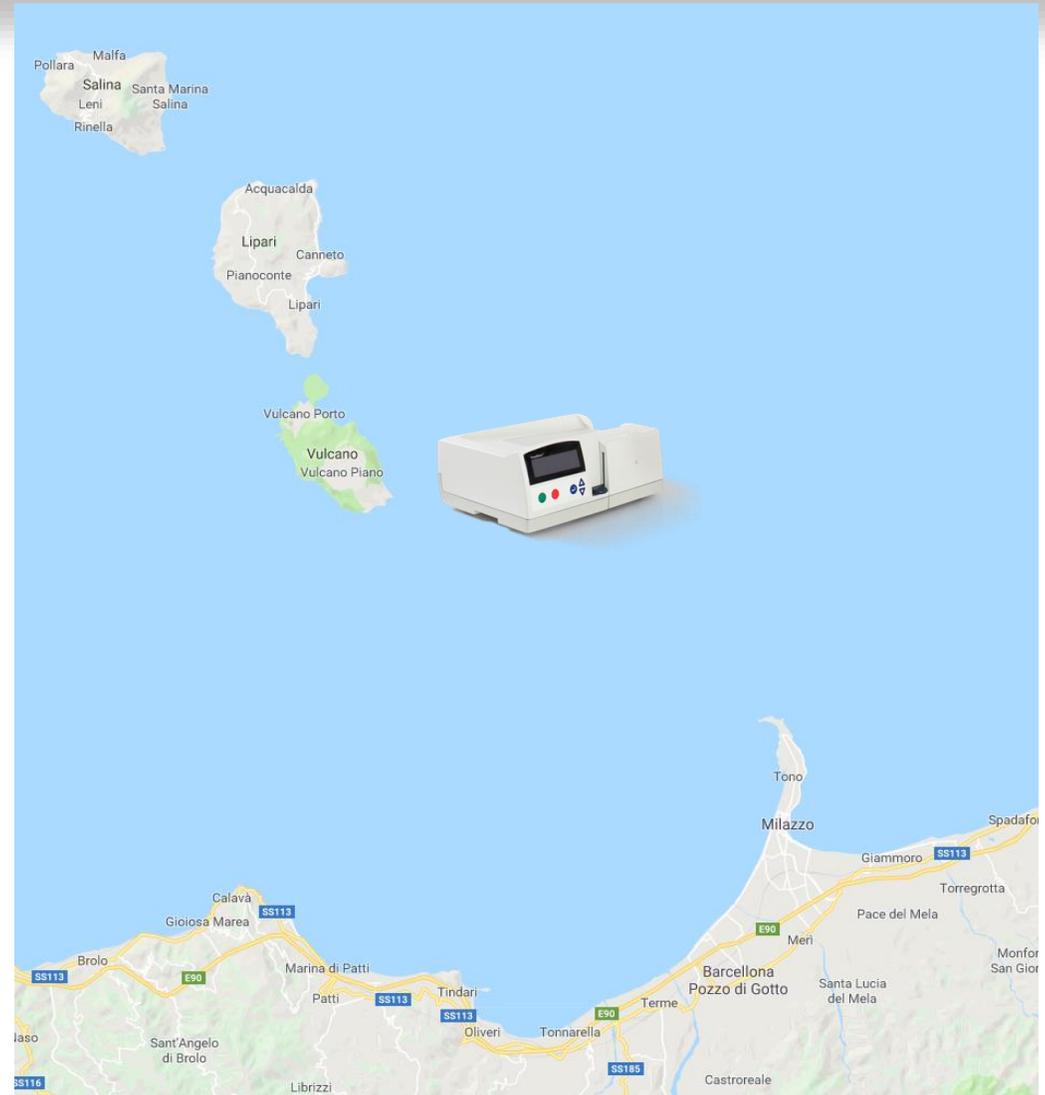

Davide è contento perché durante il primo inverno sull'isola in terapia domiciliare:

- Sa che il centro controlla la sua terapia quotidianamente.
- Il suo medico può intervenire immediatamente a modificare la terapia... anche se il programma è bloccato!
- Rimanendo ognuno a casa propria.

Al medico ha strappato la promessa di allungare i tempi della visita.

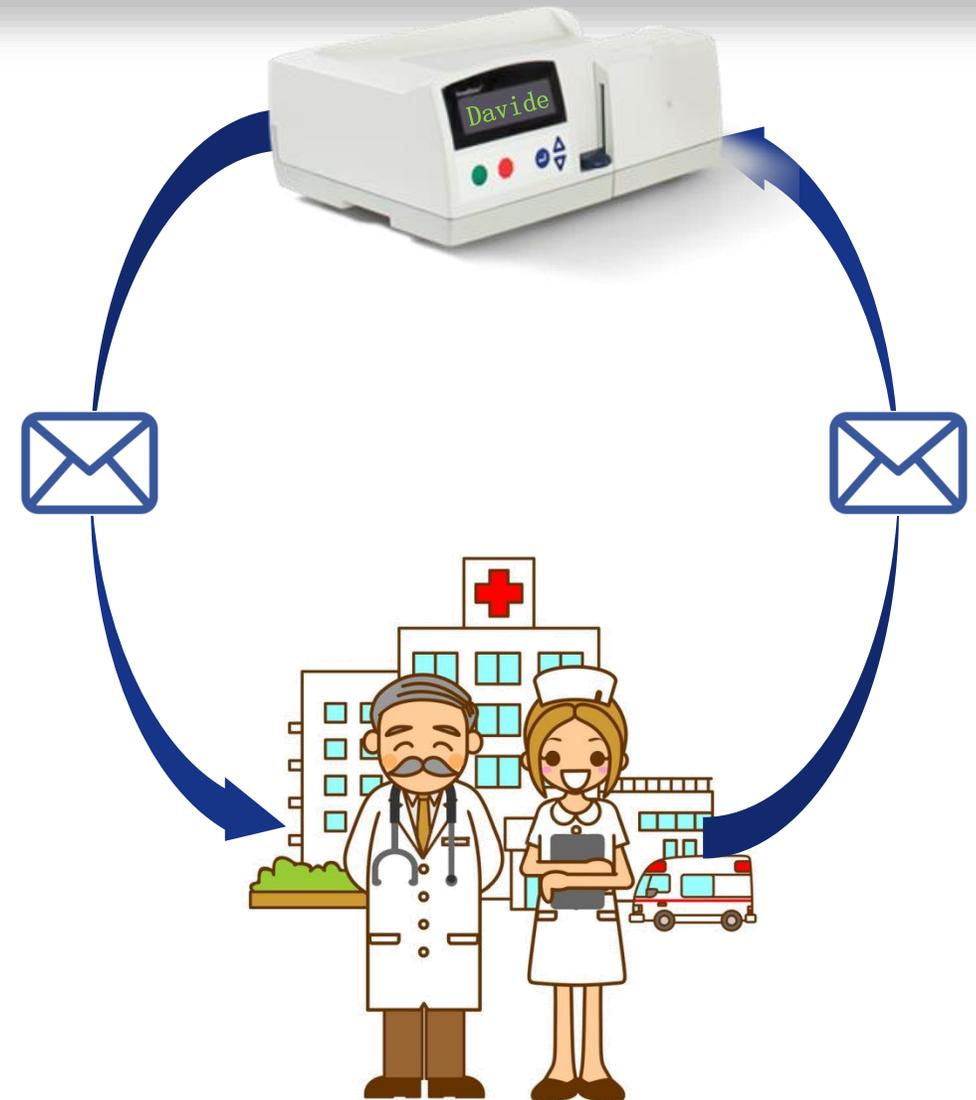

Un ultimo aggiornamento:

Il medico chiama BAXTER perché talvolta mancano i trattamenti per alcune giornate consecutive.

[Legenda](#)

◀ 02 marzo 2018 - 08 marzo 2018 ▶

Paziente	mercoledì 2	giovedì 3	venerdì 4	sabato 5	domenica 6	lunedì 7	martedì 8
<a href="#">Davide</a> Dispositivo in uso: Homechoice Claria							
Registrazioni 1 – 3 di 3							

Davide tutte le sere esegue correttamente la dialisi automatizzata ma...

...ogni tanto passa qualche giorno a Lipari dove studiano i figli e dove ha portato la vecchia *HC PRO*.

Ma a breve riceverà una seconda *HC CLARIA* per una costante connessione con il centro.



Per Davide non è stato un bel Natale quello appena trascorso...

Me lo ha detto chiaramente!

Avrebbe preferito fare volentieri a meno della dialisi.

Ma, scambiandoci gli auguri, mi ha ringraziato perché tutti insieme lo abbiamo aiutato ad affrontare con un po' più di serenità la sua nuova situazione e il suo futuro.



**S** haresource

**M** odel

**A** dvanced

**R** emote

**T** herapy

**NURSING**

Con Claria & Sharesource  
il nursing è sempre più smart

